

mectron

WE ♥ PRO
PHYLAXIS

WE ♥ PRO
PHYLAXIS

WE ♥ PRO
PHYLAXIS

→ MECTRON INSERTI PER ULTRASUONI



→ INSERTI PER ULTRASUONI

→ MULTIPIEZO *white*

→ UN'AMPIA VARIETÀ DI APPLICAZIONI

mectron offre una vasta gamma di inserti per numerose applicazioni. L'elevata qualità tecnologica mectron garantisce elevate prestazioni e massima sicurezza nel trattamento.

Questo importante livello qualitativo nasce dal perfetto equilibrio tra un'elettronica raffinata degli ablatori mectron ed uno speciale design progettuale degli inserti.



→ COMBI touch



→ MICROPIEZO



→ MICROPIEZO S



→ MULTIPIEZO touch



→ MULTIPIEZO PRO



→ COMPACT PIEZO LED




→ COMPACT PIEZO P2K



→ LA GAMMA

Una gamma di oltre 48 inserti è disponibile per svariati campi di impiego.

Specifici inserti per particolari tipi di applicazione vengono raggruppati in kit dedicati. Il contenitore è costituito da un supporto in acciaio che si può utilizzare sia per la custodia che per la sterilizzazione degli inserti.

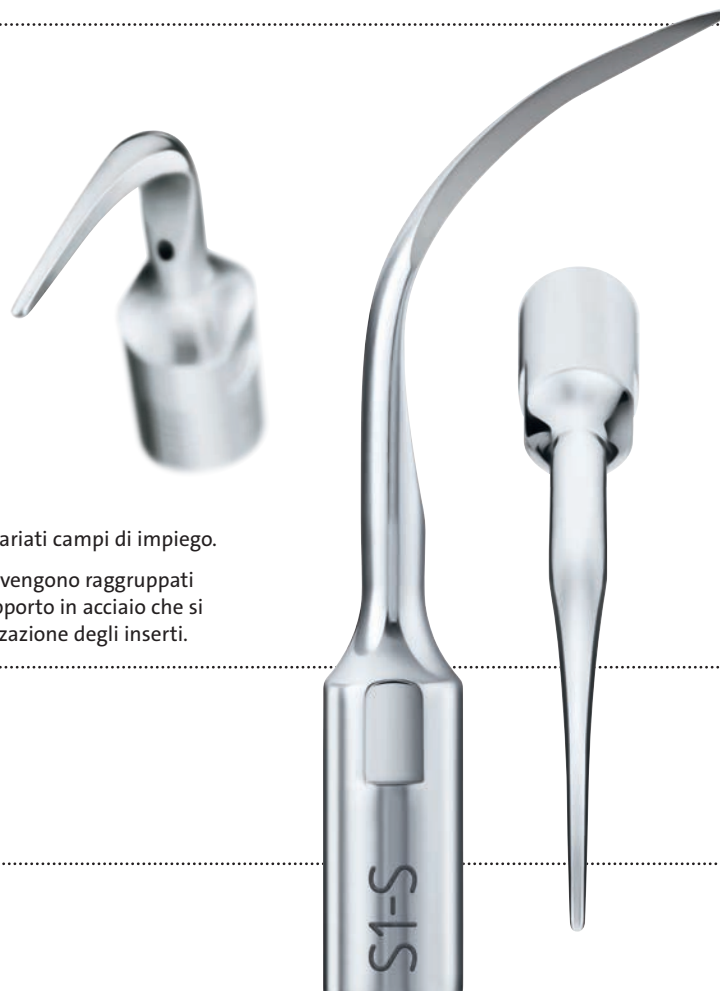


→ CHIAVE DINAMOMETRICA K10



→ CHIAVE DINAMOMETRICA K10

- sterilizzabile
- in dotazione con ogni singolo inserto acquistato

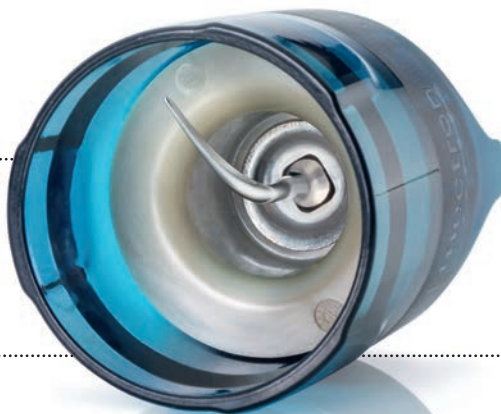

INDICE

→ 8-16 SET INSERTI

- 8/9 Set maintenance/Set scaling
- 10/11 Set perio maintenance/Set perio treatment
- 12/13 Set implant cleaning/Set endo
- 14/15 Set endo revision/Set endo retro

→ 16-21 INSERTI SCALING

- 16/17 Inserto S1/Inserto S1-S
- 18/19 Inserto S2/Inserto S3
- 20/21 Inserto S4/Inserto S5

→ 22-24 INSERTI SCALING HIGH EFFICIENCY

- 22/23 Inserto S6/Inserto S7
- 24 Inserto S8

→ 26-29 INSERTI PERIO UNIVERSAL

- 26/27 Inserto P1/Inserto P2
- 28/29 Inserto P3/Inserto P4

→ 30-37 INSERTI PERIO ANATOMIC

- 30/31 Inserto P10/Inserto P11
- 32/33 Inserto P12/Inserto P13
- 34/35 Inserto P14/Inserto P15
- 36/37 Inserto P16R/Inserto P16L

→ 38-39 INSERTI IMPLANT CLEANING

→ 40-43 INSERTI ENDO

- 40/41 Inserto E1/Inserto E2
- 42/43 Lime endo

→ 44-49 INSERTI ENDO REVISION

- 45 Inserto ER1
- 46/47 Inserto ER2/Inserto ER3
- 48/49 Inserto ER4/Inserto ER5

→ 50-58 INSERTI ENDO RETRO

- 51 Inserto R1
- 52/53 Inserto R2/Inserto R3
- 54/55 Inserto R4/Inserto R5
- 56/57 Inserto RD3/Inserto RD4
- 58 Inserto RD5

→ 60-61 CROWN PREP TIPS

→ 62-65 INSERTI CAVITY MARGIN

- 62/63 Inserto CM1/Inserto CM2
- 64/65 Inserto CM3/Inserto CM4

→ 66-69 INSERTI RESTORATIVE

- 66/67 Inserto D1/Inserto D2
- 68/69 Inserto D3/Inserto D4

→ 70-71 SETTAGGI APPROPRIATI

→ 72-73 LISTA ARTICOLI/TIP CARD

→ 74-75 WWW.WE-LOVE-PROPHYLAXIS.COM

→ SET MAINTENANCE

→ CONTENUTO:

- 1 inserto S1
- 1 inserto S2
- 1 inserto S5
- 1 inserto P2
- 1 inserto P10
- 5 chiavi dinamometriche K10



→ SET SCALING

→ CONTENUTO:

- 1 inserto S1
- 1 inserto S2
- 1 inserto S3
- 1 inserto S4
- 1 inserto S5
- 5 chiavi dinamometriche K10



→ SET PERIO MAINTENANCE

→ CONTENUTO:

- 1 inserto P10
- 1 inserto P11
- 1 inserto P12
- 1 inserto P13
- 1 inserto P14
- 5 chiavi dinamometriche K10



→ SET PERIO TREATMENT



→ CONTENUTO:

- 1 inserto S1-S
- 1 inserto P2
- 1 inserto P15
- 1 inserto P16R
- 1 inserto P16L
- 5 chiavi dinamometriche K10



→ SET IMPLANT CLEANING

→ CONTENUTO:

- 1 inserto base ICS
- 1 chiave dinamometrica K10
- 5 terminali IC1




→ SET ENDO



→ CONTENUTO:

- 1 supporto per file E1 120°
- 1 supporto per file E2 90°
- 6 NiTi-file ISO 15, 27 mm
- 6 NiTi-file ISO 20, 27 mm
- 6 NiTi-file ISO 25, 27 mm
- 6 NiTi-file ISO 15, 31 mm
- 6 NiTi-file ISO 20, 31 mm
- 6 NiTi-file ISO 25, 31 mm
- 1 chiave per inserti K1
- 1 chiave per lime endo

SET INSERTI

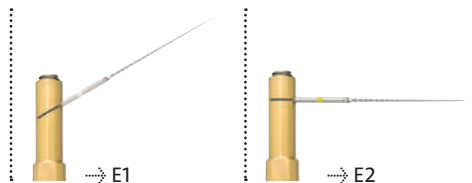

→ SET ENDO REVISION

→ CONTENUTO:

- 1 inserto ER1
- 1 inserto ER2
- 1 inserto ER3
- 1 inserto ER4
- 1 inserto ER5
- 5 chiavi dinamometriche K10




→ SET ENDO RETRO


→ CONTENUTO:

- 1 inserto R1
- 1 inserto R2
- 1 inserto R3
- 1 inserto R4
- 1 inserto R5
- 5 chiavi dinamometriche K10



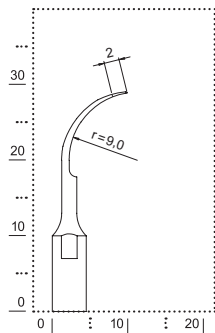

- IDENTIFICAZIONE
scaling
- FORMA
curette universale a sezione semicircolare
- SUPERFICIE
rivestimento in acciaio inossidabile
di grado medicale
- TRATTAMENTO
asportazione di grandi accumuli di tartaro

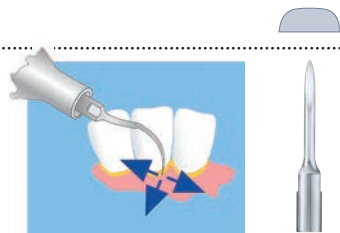



→ IDENTIFICAZIONE

perio/scaling

→ FORMA



curette universale lunga a sezione triangolare e superficie arrotondata


→ SUPERFICIE

rivestimento in acciaio inossidabile di grado medico

→ TRATTAMENTO

rimozione di tartaro sopra-gengivale e asportazione di biofilm e concrezioni sottogengivali

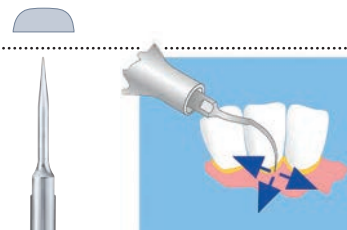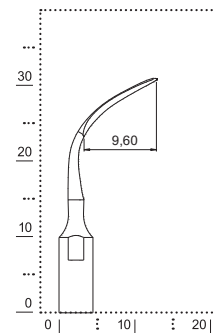

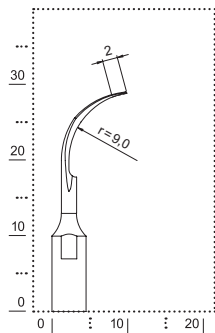


→ IDENTIFICAZIONE
scaling

→ FORMA
curette universale a sezione triangolare
e superficie arrotondata

→ SUPERFICIE
rivestimento in acciaio inossidabile
di grado medicale

→ TRATTAMENTO
lavorazione delle superfici inter-
prossimali e delle zone posteriori

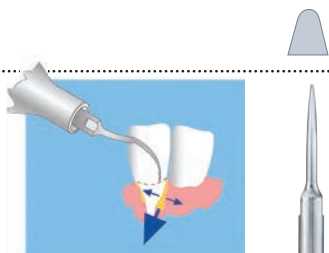



→ **IDENTIFICAZIONE**

scaling

→ **FORMA**


piatta con spigoli arrotondati


→ **SUPERFICIE**

rivestimento in acciaio inossidabile
di grado medico

→ **TRATTAMENTO**

asportazione di tartaro supragengivale
di vaste porzioni

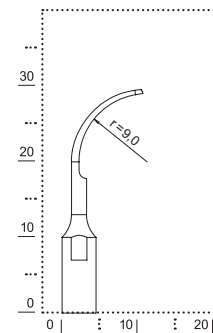

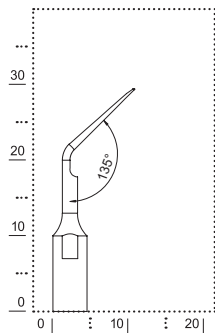


→ IDENTIFICAZIONE
scaling

→ FORMA
curette universale con superficie
di lavoro triangolare, leggermente
arrotondata ad angolo di 45°

→ SUPERFICIE
rivestimento in acciaio inossidabile
di grado medicale

→ TRATTAMENTO
asportazione del tartaro dalle
superfici interdentali mesiali e
distali nella zona posteriore

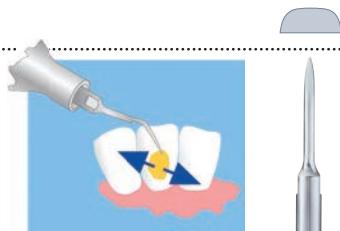



→ IDENTIFICAZIONE

scaling

→ FORMA



analoga all'inserto S1, ma più lungo
e più sottile


→ SUPERFICIE

rivestimento in acciaio inossidabile
di grado medico

→ TRATTAMENTO

asportazione delicata di tartaro
sopragengivale e subgengivale e
trattamento della gengivite

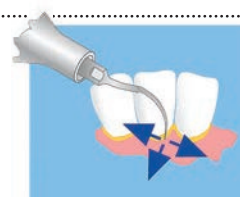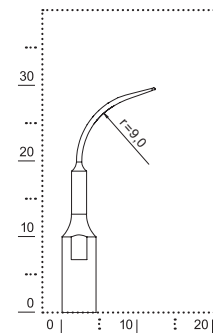

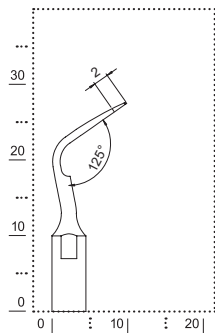


→ IDENTIFICAZIONE
scaling

→ FORMA
inserto controangolato analogo
all'inserto S1 (curette universale con
diametro a semicerchio)

→ SUPERFICIE
rivestimento in acciaio inossidabile
di grado medico

→ TRATTAMENTO
inserto altamente efficiente (prestazione
doppia rispetto all'inserto S1) per l'asporta-
zione di grandi formazioni di tartaro

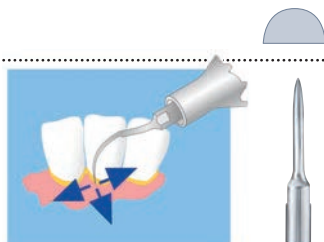



→ **IDENTIFICAZIONE**

scaling

→ **FORMA**



inserto controangolato analogo all'inserto S2
(curette universale con diametro triangolare
e superficie arrotondata)


→ **SUPERFICIE**

rivestimento in acciaio inossidabile
di grado medicale

→ **TRATTAMENTO**

inserto altamente efficiente (prestazione
doppia rispetto all'inserto S2) per superfici
interprossimali e zone posteriori

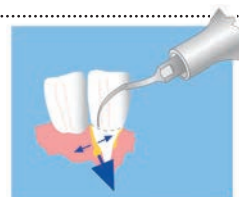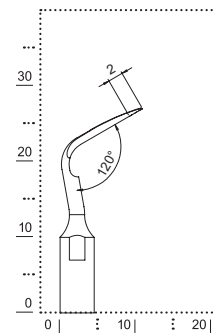

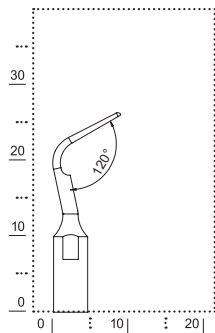



→ IDENTIFICAZIONE
scaling

→ FORMA
inserto controangolato analogo all'inserto S3
(piatto con spigoli arrotondati)

→ SUPERFICIE
rivestimento in acciaio inossidabile
di grado medicale

→ TRATTAMENTO
inserto altamente efficiente
(prestazione doppia rispetto all'inserto S3)
per l'asportazione di tartaro sopragengivale
di vaste porzioni

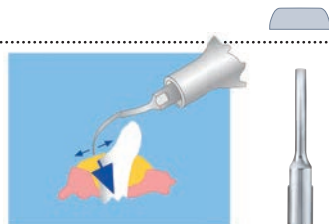

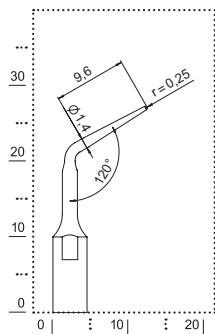

→ IDENTIFICAZIONE
perio

→ FORMA
punta diritta lunga con superficie
arrotondata

→ SUPERFICIE
rivestimento in acciaio inossidabile
di grado medicale

→ TRATTAMENTO
asportazione di concrezioni e biofilm
dalla superficie radicolare





→ IDENTIFICAZIONE

perio

→ FORMA


punta ricurva con superficie arrotondata


→ SUPERFICIE

rivestimento in acciaio inossidabile
di grado medicale

→ TRATTAMENTO

asportazione di concrezioni e biofilm
dalla superficie radicolare

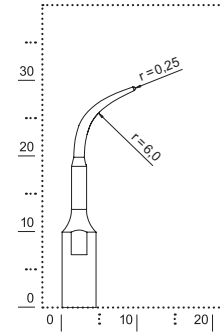

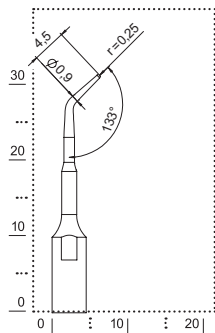

→ IDENTIFICAZIONE
perio

→ FORMA
fusto lungo e diritto, punta corta con
superficie arrotondata

→ SUPERFICIE
rivestimento in acciaio inossidabile
di grado medicale

→ TRATTAMENTO
asportazione di concrezioni e biofilm
dalle forcazioni





→ IDENTIFICAZIONE

perio

→ FORMA


punta diritta molto lunga con
superficie arrotondata


→ SUPERFICIE

rivestimento in acciaio inossidabile
di grado medicale

→ TRATTAMENTO

asportazione di concrezioni e biofilm
dalla superficie radicolare

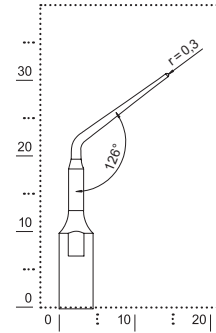

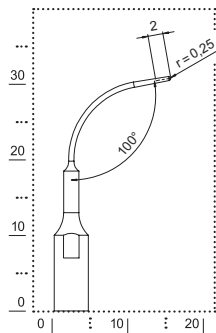

→ IDENTIFICAZIONE
perio

→ FORMA
punta molto lunga leggermente curva
con superficie arrotondata

→ SUPERFICIE
rivestimento in acciaio inossidabile
di grado medicale

→ TRATTAMENTO
asportazione di concrezioni e biofilm
dalla superficie radicolare







→ IDENTIFICAZIONE
perio

→ FORMA
punta curva con angolo a destra (15°)
con superficie arrotondata

→ SUPERFICIE
rivestimento in acciaio inossidabile
di grado medico

→ TRATTAMENTO
asportazione delicata di concrezioni
subgengivali

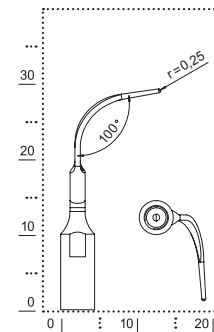

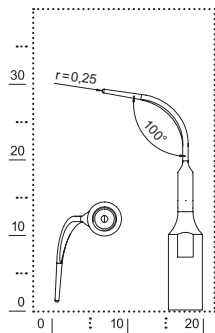


→ IDENTIFICAZIONE
perio

→ FORMA
punta curva con angolo a sinistra (15°)
con superficie arrotondata

→ SUPERFICIE
rivestimento in acciaio inossidabile
di grado medicale

→ TRATTAMENTO
asportazione delicata di concrezioni
subgingivali e biofilm da forcazioni e
concavità

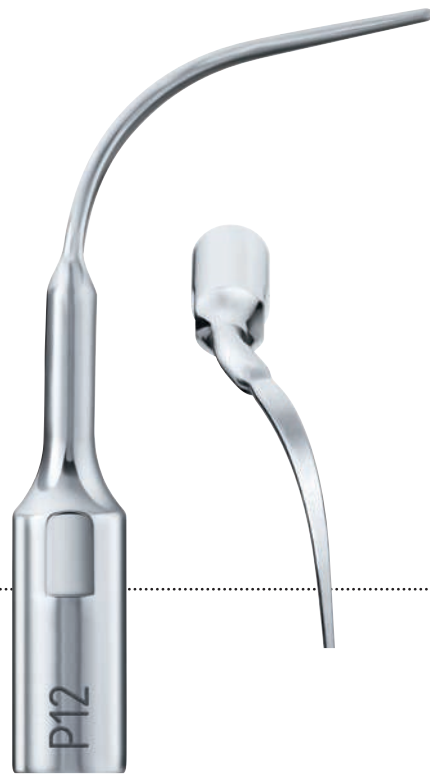





→ IDENTIFICAZIONE
perio

→ FORMA
punta curva con angolo a destra (15°)
con superficie arrotondata e piccola sfera
($\varnothing = 0,65 \text{ mm}$) all'estremità

→ SUPERFICIE
rivestimento in acciaio inossidabile
di grado medicale

→ TRATTAMENTO
asportazione delicata di concrezioni
subgingivali

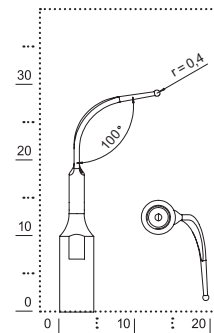

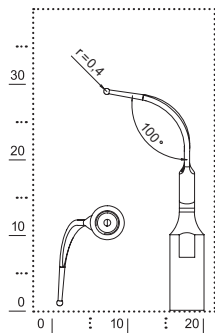

→ IDENTIFICAZIONE
perio

→ FORMA
punta curva con angolo a sinistra (15°)
con superficie arrotondata e piccola sfera
($\varnothing = 0,65$ mm) all'estremità

→ SUPERFICIE
rivestimento in acciaio inossidabile
di grado medicale

→ TRATTAMENTO
asportazione delicata di concrezioni
subgingivali e biofilm da forcazioni e
concavità







→ IDENTIFICAZIONE
perio


→ FORMA
inserto a forma di curette universale
con superficie arrotondata

→ SUPERFICIE
rivestimento in acciaio inossidabile
di grado medicale

→ TRATTAMENTO
asportazione di concrezioni e biofilm
sopra e sottogengivale nei settori
anteriori e canini. Debridement delle
tasche più profonde.

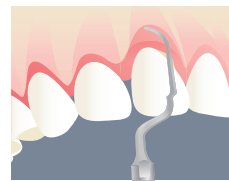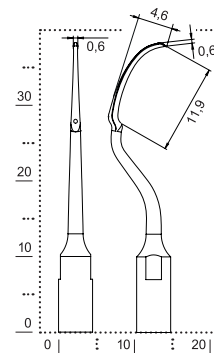

P16R

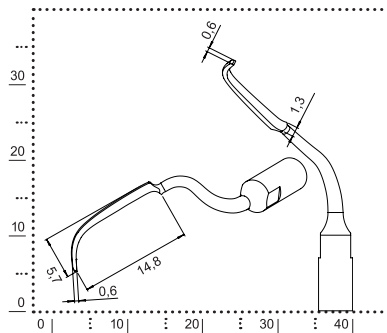


→ **IDENTIFICAZIONE**
perio

→ **FORMA**
inserto a forma di curette
parodontale angolato a destra

→ **SUPERFICIE**
rivestimento in acciaio inossidabile
di grado medicale

→ **TRATTAMENTO**
asportazione di concrezioni e bio-
film sottogengivale da forcazioni e
tasche profonde. Ideale nei settori
molari e premolari.

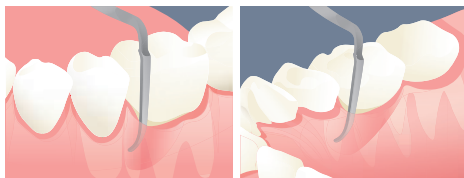





→ IDENTIFICAZIONE
perio

→ FORMA
inserto a forma di curette
parodontale angolato a sinistra


→ SUPERFICIE
rivestimento in acciaio inossidabile
di grado medicale

→ TRATTAMENTO
asportazione di concrezioni e bio-
film sottogengivale da forcazioni e
tasche profonde. Ideale nei settori
molari e premolari.

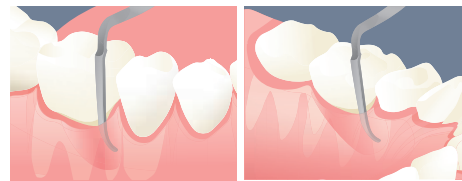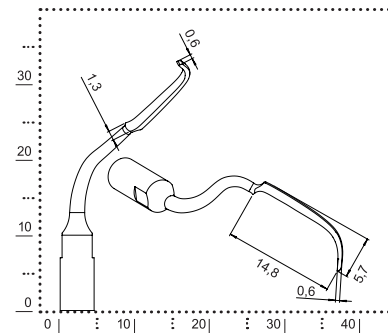

→ INSERTO PER LA DETERSIONE DI IMPIANTI

- terminale IC1 – 100% in PEEK (materiale plastico) – garantisce il massimo rispetto della superficie dell'impianto
- Massima accessibilità e visibilità anche nelle zone posteriori grazie alla speciale curvatura dell'inserto base ICS
- Inserto base ICS e terminale IC1 completamente autoclavabili

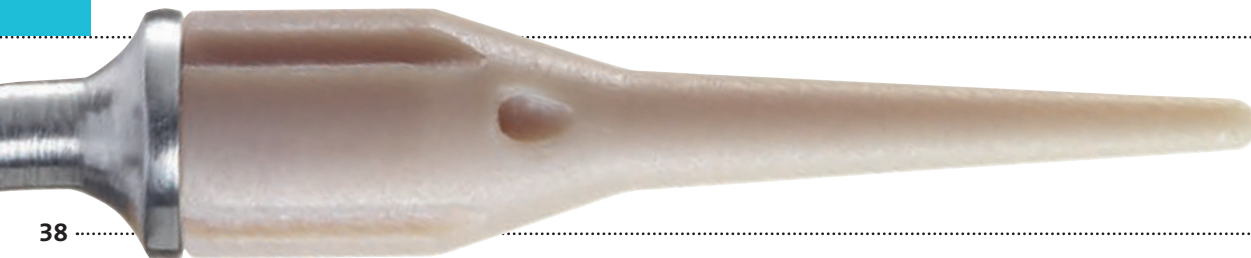

→ IMPLANT CLEANING SET S

Il set é composto
da un inserto base ICS
e 5 terminali IC1.





→ IDENTIFICAZIONE
perio

→ FORMA
inserto base angolato a 102° con terminale
conico in PEEK (lunghezza operativa 10 mm,
Ø apicale 0,8 mm, Ø coronale 2 mm)

→ SUPERFICIE
acciaio inossidabile di grado medicale per
inserto base ICS e 100% PEEK per terminale IC1

→ TRATTAMENTO
deterzione delicata della superficie implantare
e di restauri

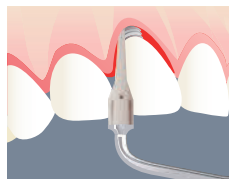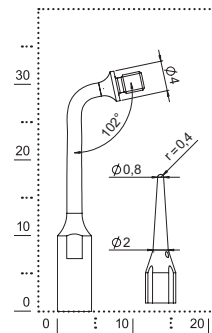


→ ICS



→ IC1

Il terminale IC1 viene
facilmente avvitato
sull'inserto base ICS
ed è completamente
sterilizzabile.

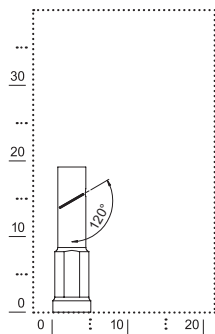


→ IDENTIFICAZIONE
endo

→ FORMA
portalime 120° per lime endo

→ SUPERFICIE
rivestimento in nitrato di titanio

→ TRATTAMENTO
trattamento endodontico di
denti incisivi e premolari


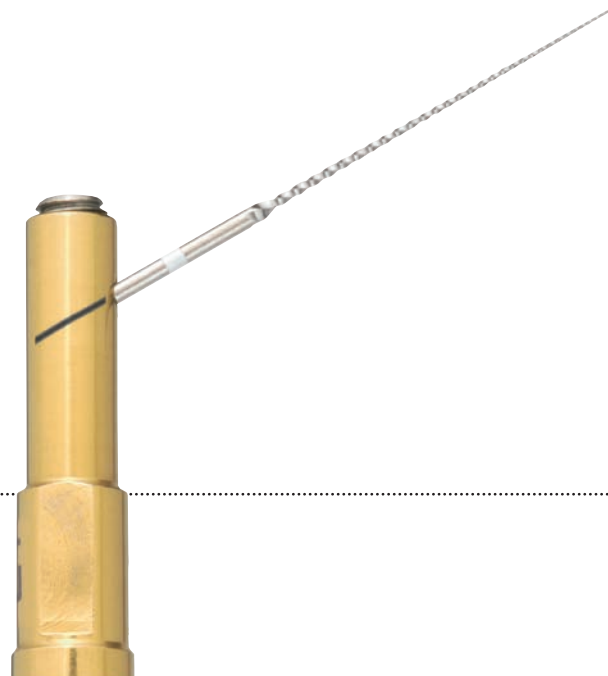


→ **IDENTIFICAZIONE**
endo

→ **FORMA**
portalime 90° per lime endo

→ **SUPERFICIE**
rivestimento in nitruro di titanio

→ **TRATTAMENTO**
trattamento endodontico di
denti molari

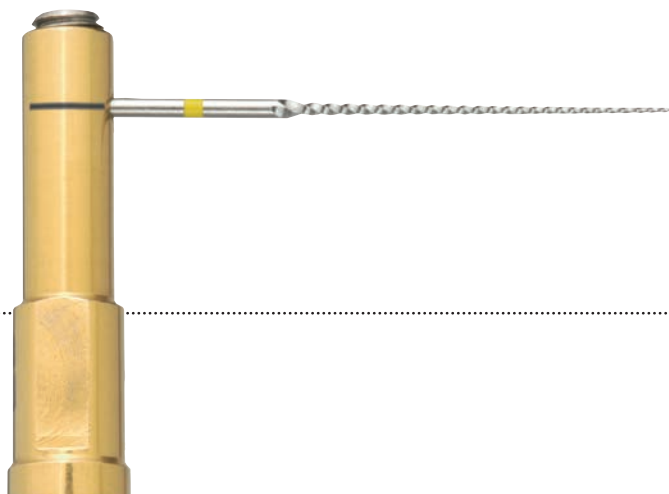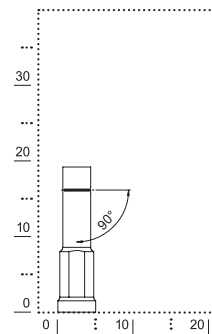

→ LIME ENDO

→ LIME IN NICHEL TITANIO PER DISPOSITIVI AD ULTRASUONI

ISO 15



ISO 20



ISO 25



→ LUNGHEZZA 27 MM

ISO 15



ISO 20



ISO 25




Le lime endo mectron consentono una preparazione veloce dell'otturazione tridimensionale dei canali radicolari. In seguito all'attivazione del liquido per irrigazione con gli ultrasuoni, si manifestano due effetti: l'effetto cavitazionale e le correnti acustiche. Le correnti acustiche asportano lo smear layer ed altro materiale necrotico dal sistema dei canali radicolari.

L'effetto cavitazionale battericida, insieme all'aumento della temperatura, generato dalle oscillazioni delle lime ad ultrasuoni, provvede alla disinfezione del sistema dei canali radicolari.

→ LUNGHEZZA 31 MM

→ INSERTI PER ULTRASUONI DEDICATI ALL'ENDODONZIA ORTOGRADA

Si tratta di cinque inserti che permettono di gestire situazioni cliniche non risolvibili con le frese tradizionali. Trovano applicazione nella rimozione di perni endocanalari metallici, di calcoli pulpari nel terzo coronale del canale, di materiale da otturazione e di strumenti fratturati nel terzo medio apicale.

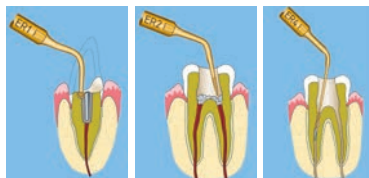



→ IDENTIFICAZIONE

endo revision

→ FORMA


inserto angolato con estremità
sferica $\varnothing = 1,7 \text{ mm}$ e diamantatura
di grana fine (D30)


→ SUPERFICIE

rivestimento in nitruro di titanio

→ TRATTAMENTO

esposizione di perni canalari

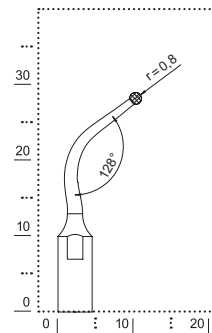

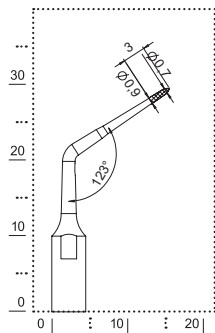

→ IDENTIFICAZIONE

endo revision

→ FORMA

inserto angolato con profilo conico
 $\varnothing = 0,7 \text{ mm}$, lunghezza utile 10 mm,
 estremità appuntita e diamantata D30
 negli ultimi 5 mm

→ SUPERFICIE

rivestimento in nitruro di titanio

→ TRATTAMENTO

per canali atresici, apertura di istmi e
 ricerca di imbocchi calcificati





→ IDENTIFICAZIONE

endo revision

→ FORMA


inserto angolato sottile $\varnothing = 0,6$ mm,
lunghezza utile 10 mm, estremità appuntita
e diamantata D30 negli ultimi 5 mm


→ SUPERFICIE

rivestimento in nitruro di titanio

→ TRATTAMENTO

per canali atresici, rimozione di cementi
canalari e di strumenti fratturati nei canali

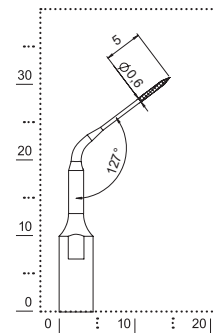

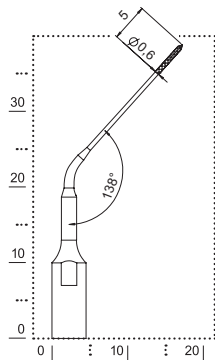

→ IDENTIFICAZIONE

endo revision

→ FORMA

inserto angolato sottile $\varnothing = 0,6$ mm,
lunghezza utile 20 mm, estremità appuntita
e diamantata D30 negli ultimi 5 mm


→ SUPERFICIE

rivestimento in nitruro di titanio

→ TRATTAMENTO

per canali atresici, rimozione di cementi
canalari e di strumenti fratturati nei canali



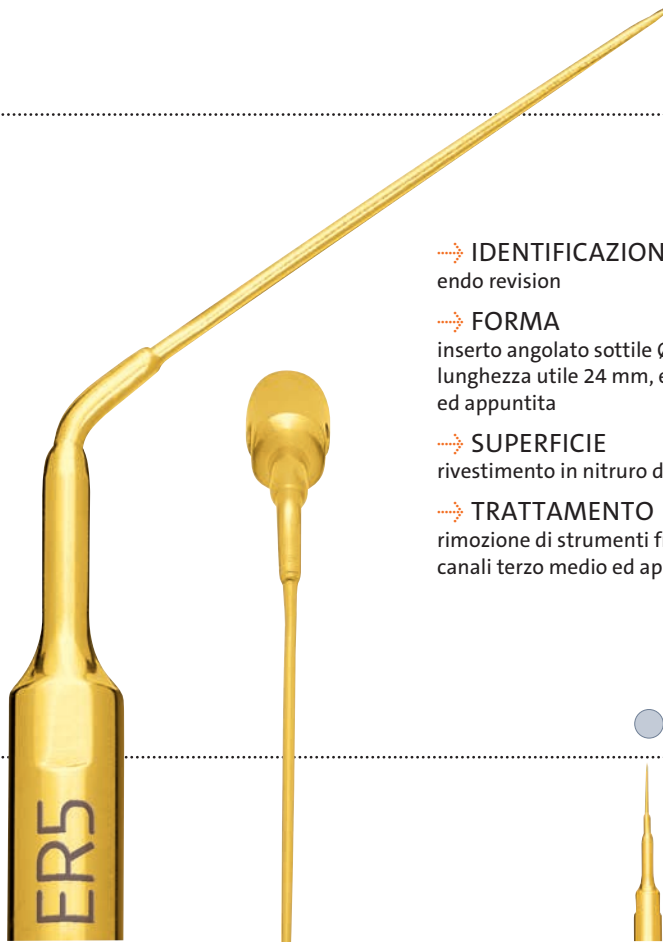

→ **IDENTIFICAZIONE**

endo revision

→ **FORMA**


inserto angolato sottile $\varnothing = 0,5$ mm,
lunghezza utile 24 mm, estremità liscia
ed appuntita

→ **SUPERFICIE**

rivestimento in nitrato di titanio

→ **TRATTAMENTO**


rimozione di strumenti fratturati nei
canali terzo medio ed apicale

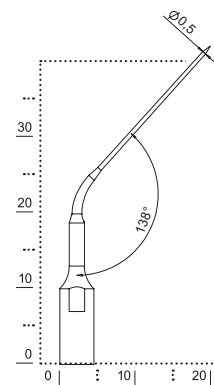

→ INSERTI ENDO RETRO – TRATTAMENTO RETROGRADO DEL CANALE RADICOLARE, POCO INVASIVO

Nell'apicectomia, l'accesso all'apice radicolare è il punto più critico. Gli inserti endo retro permettono un accesso ottimale. Grazie alla struttura dell'inserto estremamente fine, la finestra ossea può essere più stretta e la radice può essere sezionata in modo più conservativo, con un angolo di quasi 90°.

Il trattamento retrogrado del canale radicolare è poco invasivo ed assicura al paziente meno dolore ed un minore tempo di guarigione.

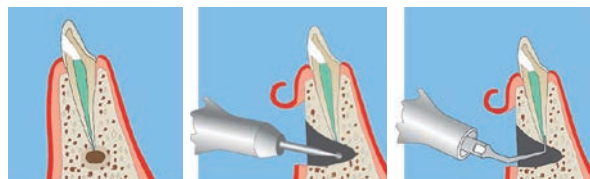



→ **IDENTIFICAZIONE**

endo retro

→ **FORMA**


inserto curvo con punta rotonda,
rastremato


→ **SUPERFICIE**

rivestimento in nitruro di titanio

→ **TRATTAMENTO**

identificazione e preparazione dei
canali radicolari

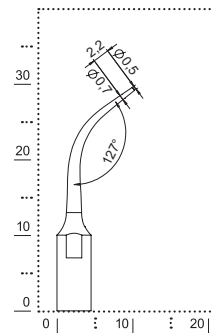

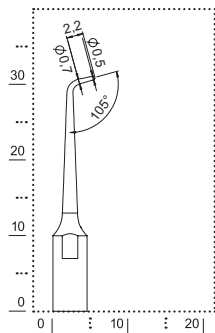

→ IDENTIFICAZIONE

endo retro

→ FORMA

fusto diritto con punta angolata a 90°

→ SUPERFICIE

rivestimento in nitrato di titanio

→ TRATTAMENTO

lavorazione dei canali radicolari sul lato frontale





→ IDENTIFICAZIONE

endo retro

→ FORMA


fusto angolato con punta angolata a 90°


→ SUPERFICIE

rivestimento in nitrato di titanio

→ TRATTAMENTO

lavorazione dei canali radicolari sul lato frontale

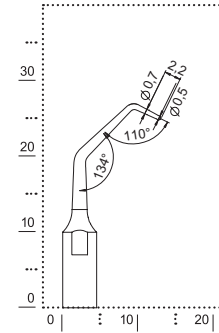

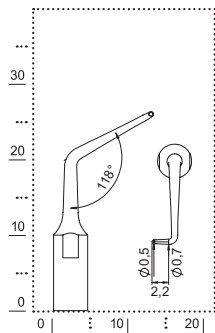

→ IDENTIFICAZIONE

endo retro

→ FORMA

fusto angolato con punta angolata
a destra di 90°

→ SUPERFICIE

rivestimento in nitruro di titanio

→ TRATTAMENTO

lavorazione dei canali radicolari dei
denti molari





→ IDENTIFICAZIONE

endo retro

→ FORMA


fusto angolato con punta angolata a sinistra di 90°


→ SUPERFICIE

rivestimento in nitrato di titanio

→ TRATTAMENTO

lavorazione dei canali radicolari dei denti molari

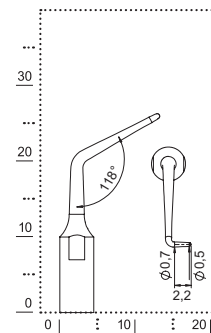

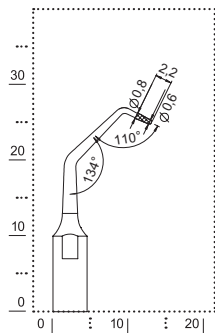

→ IDENTIFICAZIONE

endo retro

→ FORMA


fusto angolato con punta angolata a 90° e diamantatura di grana fine (D30)


→ SUPERFICIE

rivestimento in nitruro di titanio

→ TRATTAMENTO

lavorazione dei canali radicolari sul lato frontale

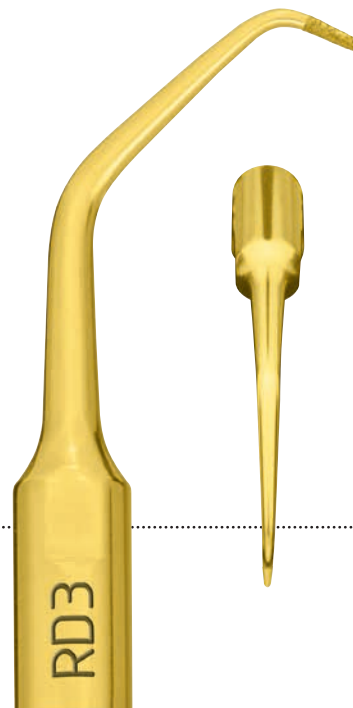

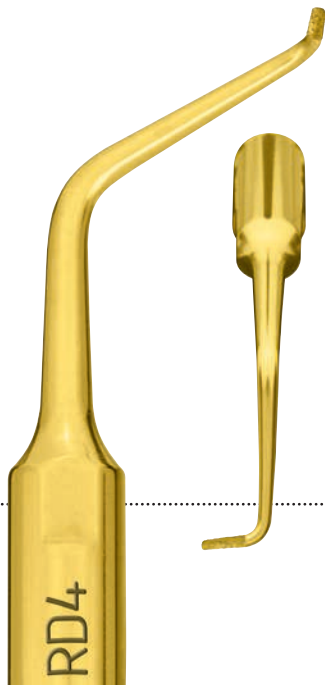

→ IDENTIFICAZIONE

endo retro

→ FORMA


fusto angolato con punta angolata a destra di 90° e diamantatura di grana fine (D30)


→ SUPERFICIE

rivestimento in nitrato di titanio

→ TRATTAMENTO

lavorazione dei canali radicolari dei denti molari

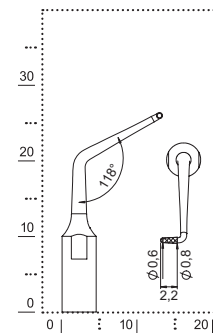

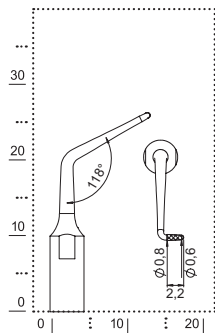

→ IDENTIFICAZIONE

endo retro

→ FORMA


fusto angolato con punta angolata a sinistra di 90° e diamantatura di grana fine (D30)

→ SUPERFICIE

rivestimento in nitrato di titanio

→ TRATTAMENTO

lavorazione dei canali radicolari dei denti molari

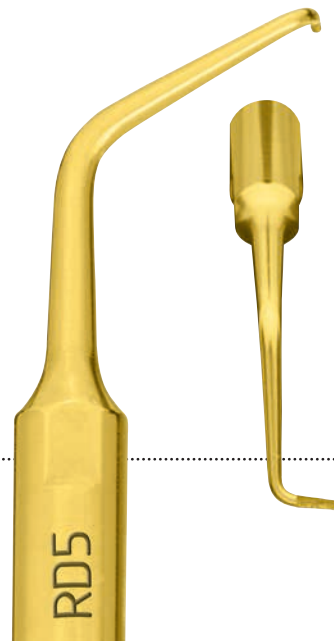

→ CROWN PREP TIPS

→ CROWN PREP TIPS – TECNICA ATRAUMATICA E PRECISA

Gli inserti ultrasonici crown prep tips sono dedicati alla rifinitura del margine protesico. Grazie alla loro particolare forma, consentono al clinico di poter lavorare sempre in contatto con l'elemento dentale nel massimo rispetto dei tessuti molli adiacenti, garantendo in questo modo un'elevata visibilità durante la preparazione, un riposizionamento del margine preciso ed un maggior comfort per il paziente.

Mectron ha infatti sviluppato un inserto base in grado di far compiere agli inserti terminali (crown prep tips) un movimento simil-ellittico che permette la lavorazione continua intorno all'elemento dentale con l'ulteriore vantaggio, derivante dagli ultrasuoni, di preservare il margine gengivale.


→ chiave dinamometrica K7



→ adattatore AB1



→ inserto base DB1
con crown prep tip

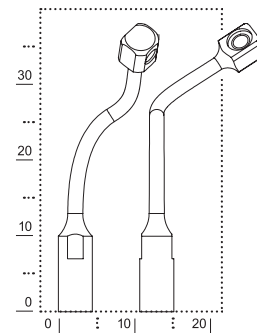

→ crown prep tip
TF12D60



→ PREPARAZIONE CON TECNICA A FINIRE

→ LUNGHEZZA 10 MM → DIAMANTATURA


diametro	D90	D60
1,2 mm	TF12D90	TF12D60
1,6 mm	TF16D90	TF16D60


→ PREPARAZIONE CON TECNICA A CHAMFER

→ LUNGHEZZA 10 MM → DIAMANTATURA

diametro	D120	D90	D60
1,2 mm		TA12D90	TA12D60
1,4 mm	TA14D120	TA14D90	TA14D60
1,6 mm	TA16D120	TA16D90	TA16D60

→ crown prep tip
TA14D60

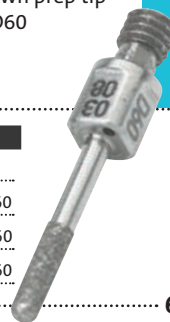

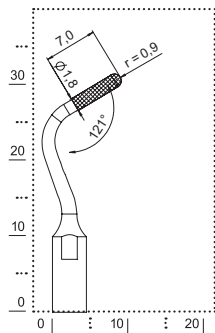

→ **IDENTIFICAZIONE**

cavity margin

→ **FORMA**

inserto angolato con estremità
semisferica $\varnothing = 1,8$ mm e
diamantatura di grana media (D91)

→ **SUPERFICIE**

rivestimento in nitruro di titanio

→ **TRATTAMENTO**

rifinitura delle preparazioni e
chiusura del margine protesico







→ IDENTIFICAZIONE
cavity margin

→ FORMA
inserto angolato con estremità
semisferica $\varnothing = 1,8$ mm e
diamantatura di grana fine (D30)

→ SUPERFICIE
rivestimento in nitrato di titanio

→ TRATTAMENTO
rifinitura delle preparazioni e
chiusura del margine protesico

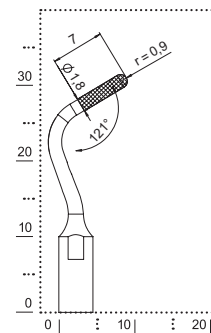

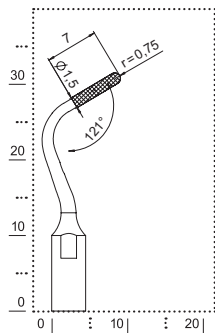

→ IDENTIFICAZIONE

cavity margin

→ FORMA

inserto angolato con estremità
semisferica $\varnothing = 1,5$ mm e
diamantatura di grana media (D91)

→ SUPERFICIE

rivestimento in nitruro di titanio

→ TRATTAMENTO

rifinitura delle preparazioni e
chiusura del margine protesico





→ IDENTIFICAZIONE

cavity margin

→ FORMA


inserto angolato con estremità
semisferica $\varnothing = 1,5$ mm e
diamantatura di grana fine (D30)


→ SUPERFICIE

rivestimento in nitrato di titanio

→ TRATTAMENTO

rifinitura delle preparazioni e
chiusura del margine protesico

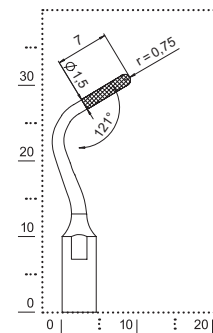

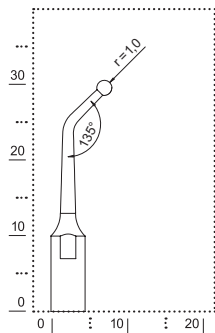


→ IDENTIFICAZIONE
restorative

→ FORMA
punta di forma sferica



→ SUPERFICIE
rivestimento in nitruro di titanio


→ TRATTAMENTO
– condensazione dell'amalgama in
cavità di classe I, II e V
– brunitura delle otturazioni d'oro
e stampate

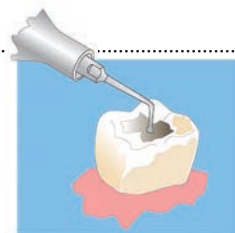





- IDENTIFICAZIONE
restorative
- FORMA
punta di forma cilindrica
- SUPERFICIE
rivestimento in nitruro di titanio
- TRATTAMENTO
 - condensazione d'amalgama in cavità di classe I, II e V
 - asportazione di corone e ponti

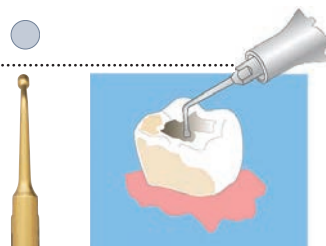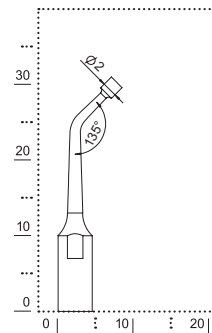


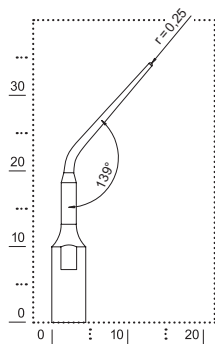


- IDENTIFICAZIONE
restorative
- FORMA
analoga ad uno spreader manuale
- SUPERFICIE
rivestimento in nitruro di titanio
- TRATTAMENTO
condensazione laterale della guttaperca

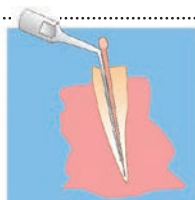

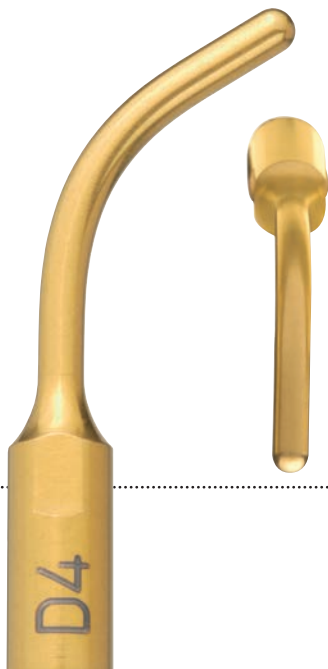

- IDENTIFICAZIONE
restorative
- FORMA
punta arrotondata
- SUPERFICIE
rivestimento in nitrato di titanio
- TRATTAMENTO
asportazione di corone, ponti e perni

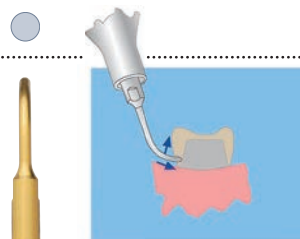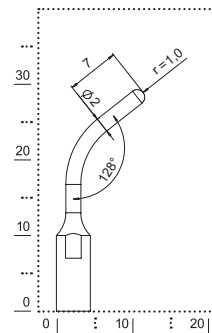

→ SETTAGGI APPROPRIATI PER

→ MULTIPIEZO PRO → MULTIPIEZO touch → MULTIPIEZO white				→ COMBI touch			→ MICROPIEZO			→ MICROPIEZO S		→ COMBI	
													
funzione	endo	perio/ scaler	restorative prosthetics	endo	perio/ scaler	restorative	endo	perio/ scaler	restorative	power		power	
SCALING													
S1-S		1-2**			1-2**			1-2**		1-2		1-2	
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8		1-3**			1-3**			1-3**		1-3		1-3	
PERIO													
P1, P2, P3, P4, P10, P11, P12, P13, P14		1-3**			1-3**			1-3**		1-3		1-2	
P15, P16R, P16L		1-2*			1-2*			1-2*		2		2	
IMPLANT CLEANING													
ICS		1-2*			1-2*			1-2*		1-2		1-2	
ENDO													
E1, E2	1-6			1-5			1-2			1-2		1	
ENDO REVISION													
ER1		2-4			1-5			1-3		3-6		2-4	
ER2, ER3, ER4, ER5		1-3			1-3			1-3		1-3		1-2	

GLI INSERTI

→ MULTIPIEZO PRO → MULTIPIEZO <i>touch</i> → MULTIPIEZO <i>white</i>			→ COMBI <i>touch</i>			→ MICROPIEZO			→ MICRO-PIEZO S			→ COMBI		
														
endo	perio/ scaler	restorative prosthetics	endo	perio/ scaler	restorative	endo	perio/ scaler	restorative	endo	perio/ scaler	restorative	power	power	

ENDO RETRO

R1, R2, R3, R4, R5, RD3, RD4, RD5	1-3			1-3			1-3			1-4		1-3
-----------------------------------	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	-----

CROWN PREP

DB1	4-6			4-5			0**			4-6		3-4
-----	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	-----

CAVITY MARGIN

CM1, CM2, CM3, CM4	2-5			1-4			0**			1-5		1-3
--------------------	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	-----

RESTORATIVE

D1, D2, D4	1-6			1-4			0**			4-6		3-4
D3	4			1-4			0**			3-5		2-3

LISTA ARTICOLI

→ DESCRIZIONE ARTICOLO/CODICE	
set maintenance	02160035-001
set scaling	02160001-001
set perio maintenance	02160006-001
set perio treatment	02160036-001
implant cleaning set S*	02160033-001
set endo	02980020-001
set endo revision	02160008-001
set endo retro	02160004-001
chiave dinamometrica K10	02900137-001
chiave dinamometrica K6	02900074
chiave K1	02270003
inserto S1-S	02960009-001
inserto S1	02960001-001
inserto S2	02960002-001
inserto S3	02960003-001
inserto S4	02960004-001
inserto S5	02960005-001
inserto S6	02960006-001
inserto S7	02960007-001
inserto S8	02960008-001
inserto P1	02970001-001
inserto P2	02970002-001
inserto P3	02970003-001
inserto P4	02970004-001
inserto P10	03080001-001
inserto P11	03080002-001
inserto P12	03080003-001



→ DESCRIZIONE ARTICOLO/CODICE	
inserto P13	03080004-001
inserto P14	03080005-001
inserto P15	03080006-001
inserto P16R	03080007-001
inserto P16L	03080008-001
inserto base ICS	03570004-001
terminale IC1 (5 pezzi)	02900112
inserto E1	02350001-001
inserto E2	02350002-001
12 x lime endo, ISO 15, 31 mm	02730001
12 x lime endo, ISO 20, 31 mm	02730002
12 x lime endo, ISO 25, 31 mm	02730003
12 x lime endo, ISO 15, 27 mm	02740001
12 x lime endo, ISO 20, 27 mm	02740002
12 x lime endo, ISO 25, 27 mm	02740003
inserto ER1	03450001-001
inserto ER2	03450002-001
inserto ER3	03450003-001
inserto ER4	03450004-001
inserto ER5	03450005-001
inserto R1	03050001-001
inserto R2	03050002-001
inserto R3	03050003-001
inserto R4	03050004-001
inserto R5	03050005-001
inserto RD3	03050006-001
inserto RD4	03050007-001

→ DESCRIZIONE ARTICOLO/CODICE	
inserto RD5	03050008-001
crown prep set**	02160009
inserto base DB1	03570001
adattatore AB1	03580001
chiave dinamometrica K7	02900081
crown prep tip TA12D60	03590001
crown prep tip TA14D60	03590002
crown prep tip TA16D60	03590003
crown prep tip TA12D90	03590004
crown prep tip TA14D90	03590005
crown prep tip TA16D90	03590006
crown prep tip TA14D120	03590007
crown prep tip TA16D120	03590008
crown prep tip TF12D60	03590010
crown prep tip TF16D60	03590011
crown prep tip TF12D90	03590012
crown prep tip TF16D90	03590013
inserto CM1	02190003-001
inserto CM2	02190004-001
inserto CM3	02190001-001
inserto CM4	02190002-001
inserto D1	02990001-001
inserto D2	02990002-001
inserto D3	02990003-001
inserto D4	02990004-001

* dotato di 1 ICS e 5 x IC1

** dotato di AB1, DB1 + K7

MECTRON TIP CARD

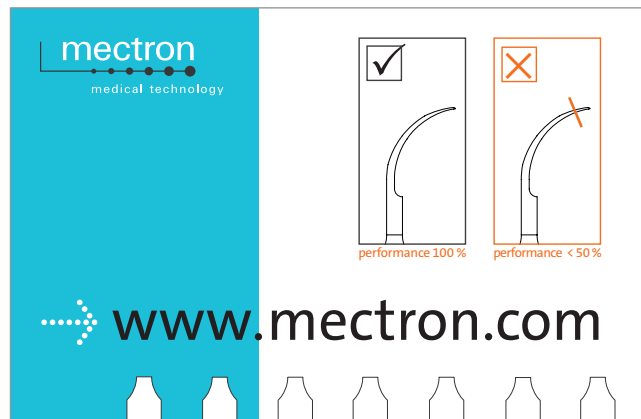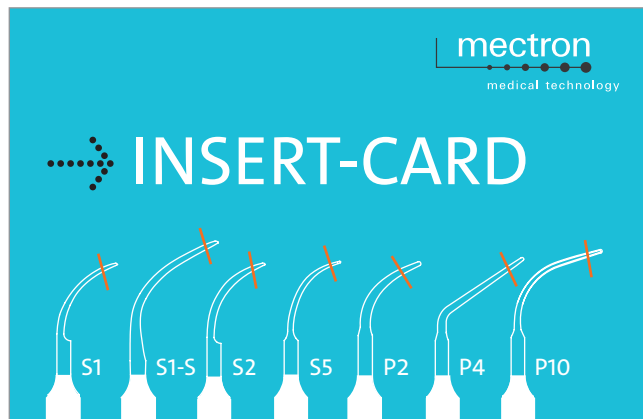

Come gli strumenti manuali, anche gli inserti per ultrasuoni si consumano. Controlli regolarmente i suoi inserti con la tip card. Se i suoi inserti sono più corti della linea arancione tratteggiata, la loro prestazione originale si è ridotta di oltre il 50%. In questo caso è consigliato sostituirli al più presto.

BENVENUTI NEL MONDO DELLA PROFILASSI E DELL'IGIENE DENTALE MECTRON!

Lo slogan we love prophylaxis nasce con l'obiettivo di trasmettere la passione per il nostro lavoro e la soddisfazione per i risultati ottenuti che vogliamo condividere con tutti i professionisti del settore.




NUOVO SITO WEB

Visita il sito www.we-love-prophylaxis.com: un nuovissimo strumento interamente dedicato alla profilassi dal punto di vista clinico.

APPLICAZIONI CLINICHE

Una sezione completa di video clinici e animazioni tutorial relative alle numerose applicazioni cliniche possibili con i dispositivi ad ultrasuoni e air-polishers Mectron.

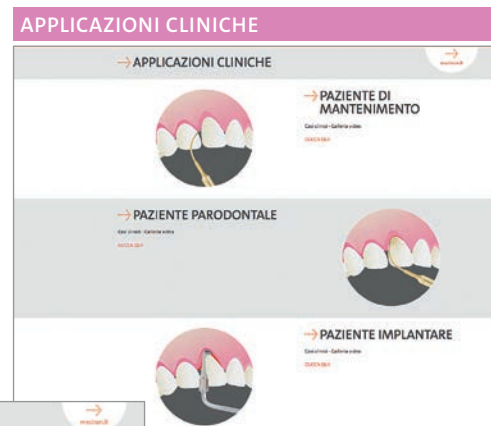

RICERCA SCIENTIFICA



→ RICERCA SCIENTIFICA

Le ricerche scientifiche si dividono in quelle che si svolgono per fornire una visione generale dell'argomento (ricerca di carattere **diagnostico**) e quelle che si svolgono per fornire informazioni più specifiche (ricerca di carattere **terapeutico**). Le ricerche scientifiche si dividono in quelle che si svolgono per fornire informazioni più specifiche (ricerca di carattere **diagnostico**) e quelle che si svolgono per fornire informazioni più specifiche (ricerca di carattere **terapeutico**).

- **Investigazioni scientifiche**
- **Diagnostica scientifica**
- **Terapie scientifiche**

Le ricerche scientifiche si dividono in quelle che si svolgono per fornire informazioni più specifiche (ricerca di carattere **diagnostico**) e quelle che si svolgono per fornire informazioni più specifiche (ricerca di carattere **terapeutico**).



→ ARTICOLI SCIENTIFICI

Le ricerche scientifiche si dividono in quelle che si svolgono per fornire informazioni più specifiche (ricerca di carattere **diagnostico**) e quelle che si svolgono per fornire informazioni più specifiche (ricerca di carattere **terapeutico**).



→ CASI CLINICI

Le ricerche scientifiche si dividono in quelle che si svolgono per fornire informazioni più specifiche (ricerca di carattere **diagnostico**) e quelle che si svolgono per fornire informazioni più specifiche (ricerca di carattere **terapeutico**).



→ PROTOCOLLI CLINICI

Le ricerche scientifiche si dividono in quelle che si svolgono per fornire informazioni più specifiche (ricerca di carattere **diagnostico**) e quelle che si svolgono per fornire informazioni più specifiche (ricerca di carattere **terapeutico**).

[illegible]

→ **RICERCA SCIENTIFICA: CASI CLINICI**

→ **PROTOCOLLO DI MANTENIMENTO PAZIENTE IMPLANTARE**

→ **LA TERAPIA IMPLANTARE, OPZIONE TERAPEUTICA PER UN CANINO INCLUSO E IL MANTENIMENTO CON APPROCCIO TAILOR-MADE**

Visita la sezione dedicata alla ricerca scientifica che include articoli scientifici, case report e protocolli clinici sviluppati in collaborazione con i principali clinici e ricercatori nazionali ed internazionali.



mectron s.p.a.,
via Loreto 15/A, 16042 Carasco (Ge), Italia,
tel +39 0185 35361, fax +39 0185 351374

→ www.mectron.it – mectron@mectron.com

© Copyright Mectron S.p.A., Carasco, Italia
Tutti i diritti riservati. Testo, immagini e grafica delle brochure Mectron sono protetti dai diritti d'autore
e da altre leggi sui diritti di proprietà. Senza autorizzazione scritta di Mectron S.p.A. il contenuto non può
essere copiato, divulgato, modificato o reso accessibile a terzi a scopi commerciali.

